

Afnameset gepooled staal voor detectie van *Chlamydia trachomatis* en *Neisseria gonorrhoeae* bij mannen.

Inhoud van de set

- Plastic bolpipet 2 ml
- 2 FLOQswabs
- Aptima Urine transport buisje

Afname instructies

- Bemonster de keel met één van de twee wissers.
- Breng de wisser in de vloeistof en beweeg dit voorzichtig gedurende 5 seconden.
- De wisser in een draaibeweging tegen de binnenkant van het flacon uitduwen.
- Sluit het flacon en gooi het eerste staafje weg.
- Herhaal dit met de tweede wisser voor de anale wisser.
- Voeg met de pipet eerstestraals urine toe tot het volume in het flacon tussen de twee streepjes komt.
- Sluit het flacon goed af.



Patiënten instructies voor het produceren van een eerstestraals urine kan u steeds vinden op onze website: <https://www.nuytinck.be/nl/patient/staalafname/staalafname-urine-1ste-straal-man>