

Afnameset gepooled staal voor detectie van *Chlamydia trachomatis* en *Neisseria gonorrhoeae* bij vrouwen.

Inhoud van de set

- 3 FLOQswabs
- Aptima transport buisje (groen)

Afname instructies

- Bemonster de keel met één van de twee wissers.
- Breng de wisser in de vloeistof en beweeg dit voorzichtig gedurende 5 seconden.
- De wisser in een draaibeweging tegen de binnenkant van het flacon uitduwen.
- Sluit het flacon en gooi het eerste staafje weg.
- Herhaal dit met de tweede wisser voor de vaginale afname.
- Herhaal dit tenslotte ook met de derde wisser voor de anale afname.
- Sluit het flacon goed af.